

Gefeliciteerd!

VOOR U LIGT DE IDAL 3G+

UPGRADED NAAR



**IDAL^{3G} + IDAL^{3G}
TWIN+**



THE IDAL[®] WAY



IDAL TIPS VAN TON



DE NIEUWE IDAL 3G+



Geeft u een waarschuwing bij een bijna lege vaccinfles



Trikt wanneer het een belangrijke boodschap voor u heeft



Is instelbaar in verschillende talen, zoals Engels en Pools

Technische vragen: **Ton van der Ven 06 54 22 30 57**



EEN PLUS VOOR NAALDLOOS VACCINEREN IN DE HUID: DE IDAL 3G+!



Welcome
to a new session!
Please rinse the
device before use →

De IDAL 3G+ vraagt u bij het opstarten om het toestel te **reinigen**.

Hoe reinig ik mijn IDAL?

- Houd de IDAL ondersteboven.
- Plaats het flesje met reinigingsvloeistof in de fleshouder. Voor de IDAL 3G+ TWIN zijn dit 2 flesjes.


- Draai het toestel om.
- Houd de trekker ingedrukt en plaats de IDAL tegen een doek.
- De IDAL begint automatisch te pompen.
- Spoel minimaal 10 keer door.

- Draai de IDAL weer om en haal de spoelvloeistof eruit.
- Plaats het vaccinflesje in de IDAL. Voor de IDAL 3G+ Twin zijn dit 2 vaccinflesjes.
- De pomp stopt automatisch zodra de sensor in de IDAL het vaccin dedetecteert.
- U ziet een rennend varken. De IDAL is klaar om te vaccineren.

- Op het einde van de sessie vraagt de IDAL u om het toestel te reinigen. Volg dezelfde procedure als bij het opstarten.

De IDAL vraagt of u een nieuwe sessie wilt **opstarten**.

- Druk op 'Yes' indien dit het geval is.
- Druk op 'No' wanneer u uw vorige sessie wilt voortzetten en de tellers wilt laten doorlopen.
- Vervolg uw vaccinatie ronde.




Day: 123 46 [Battery Icon]
[Pig Icon] [Vaccine Icon] [Reset 0]

De IDAL waarschuwt u wanneer uw **vaccinflesje bijna leeg** is. Bij 90 doseringen **trilt** de IDAL 3G+.

Indien u dit wenst, kunt u dit uitschakelen (pagina 18 van de handleiding).

Wanneer u de IDAL op zijn kop houdt om een nieuw vaccinflesje in te steken, wordt de dosisteller automatisch gereset.

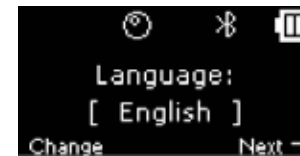

[Smiley Icon] [Bluetooth Icon] [Battery Icon]
Language:
[English]
Change Next →

- Druk in het startdisplay op 'Menu' en vervolgens op 'Next' tot u op 'Language' komt.
- Kies de gewenste **taal**.

Indien de IDAL in een voor u onbekende taal staat, volg dan de volgende stappen:

- Na 30 seconden gaat de IDAL automatisch in speelherinnering.
- Druk 7x op de rode rechterknop.
- Druk 1x op de rode linkerknop totdat de gewenste taal verschijnt.





**SAMEN INNOVEREN
MET U EN VOOR U!**



**Technische vragen:
Ton van der Ven 06 54 22 30 57**